

\*\* 2017年 8月改訂 (第3版) (新記載要領に基づく改訂等)  
\* 2014年 2月改訂 (第2版)

届出番号 27B1X00051000018

機械器具 7 4 医薬品注入器  
一般医療機器 輸液用連結管 70399000

## D I Bセット

### 再使用禁止

#### 【禁忌・禁止】


- ・再使用禁止
- ・再滅菌禁止

#### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 三矢メディカル株式会社  
TEL 06-6707-9105

販売業者 株式会社ディヴィンターナショナル  
TEL 03-5684-5684  
FAX 03-5684-5686

#### 【形状・構造及び原理等】

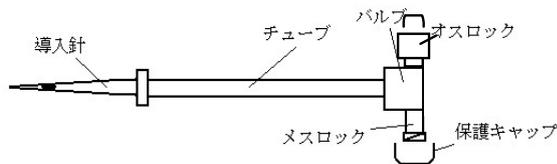

本品は、チューブにポリ塩化ビニル（可塑剤；フタル酸ジエチルヘキシル）を使用している。

#### 【使用目的又は効果】

薬液瓶内の輸液を他の医療機器に移すために用いる。

#### 【使用方法等】

- 1) 導入針のプロテクターを抜く。
- 2) バッグの排出口を上に向けて、導入針を少々回転させながら差しこみしっかりと接合する。
- 3) オスロックに、使用する携帯型持続注入ポンプ（販売名；DIBカテーター）を接合する。
- 4) メスロックにシリンジを接合する。
- 5) シリンジを引っ張り、バッグ内の薬液を吸引する。
- 6) シリンジに薬液が溜まったら、シリンジを押して携帯型持続注入ポンプへ薬液を注入する。
- 7) 携帯型持続注入ポンプに規定量の薬液が注入されるまで、5) から6) の操作を繰り返す。
- 8) 規定量の薬液の注入が完了したら、携帯型持続注入ポンプ・シリンジ・バッグの順にはずす。

#### 【使用上の注意】

- 1 導入針はバックに確実に接合させること。
- 2 オスロックは携帯型持続注入ポンプの注入口に確実に接合させること。
- 3 シリンジはロック式シリンジを使用して、メスロックに確実に接合させること。
- 4 導入針には直接手を触れないこと。
- 5 脂溶性の薬液では、ポリ塩化ビニルの可塑剤であるフタル酸ジエチルヘキシルが溶出するおそれがある。

#### 【保管方法及び有効期間等】

##### ■保管方法

水ぬれに注意して、直射日光及び高温多湿を避けて、冷暗所に保管すること。

##### ■有効期間

滅菌年月から3年以内（自己認証による）