

ENT-DIB

# 副鼻腔炎治療用カテーテル

前鼻腔バルーンと後鼻腔バルーンを膨らませる事により、  
鼻腔内を密閉し、**外科的手術を施すことなく**  
膿の吸引・洗浄・薬液注入を行うことができます。

シリコーン  
ゴム製

エアウェイ  
機能

ディスポ製品  
(滅菌製品)

認証番号:225ABBZX00165000



DIB International Co.,Ltd.

## ENT-DIB 副鼻腔炎治療用カテーテル


### 外科的手術を施すことなく 膿の吸引・洗浄・薬液注入

#### ■使用目的

ENT-DIB副鼻腔炎治療用カテーテルは、副鼻腔炎の治療に際し、外科的手術を施すことなく、各副鼻腔の自然孔より副鼻腔内に貯留した膿を吸引、排泄と洗浄液、薬液の注入を目的として使用するものです。

#### ■適応

治療目的の副鼻腔の換気路があること。重要組織（視神経、髄膜、眼窩内容など）が副鼻腔に広範囲に露出していないこと。鼻中隔穿孔がないか術側鼻腔を前後で気密にし、陰圧をかけられる状態であること。

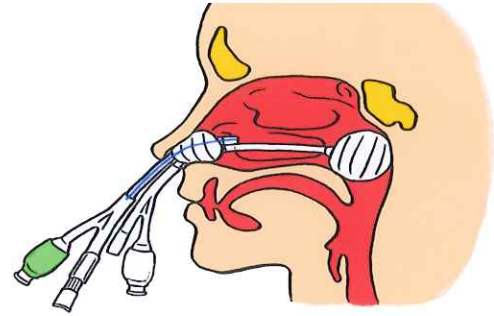


#### ■特徴

シリコンゴム製

ラテックスアレルギー等の心配がありません。

エアウェイ機能

万一後鼻腔バルーンが気道側へ落ち込んだ場合でも、最低限の呼吸確保が出来ます。

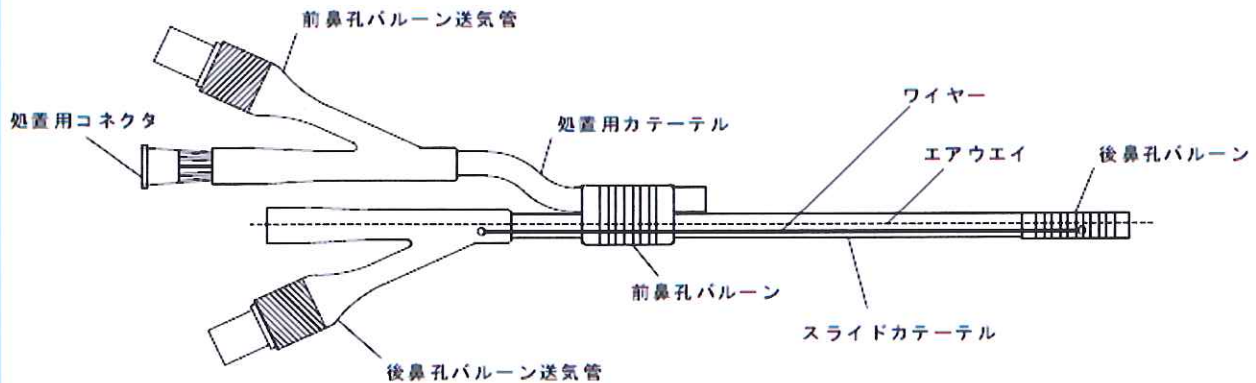

鼻腔内に挿入し、2つのバルーンにより前鼻孔及び後鼻孔を密閉し、中央の処置用カテーテルを用いて、副鼻腔に加減圧を加えることで、副鼻腔貯留液の排泄ならびに効果的な薬剤の注入が可能となります。



製品番号

品名

包装単位

700001

ENT-DIB 副鼻腔炎治療用カテーテル

6本入/箱

特定保険医療材料名

055 副鼻腔炎治療用カテーテル

3,160円

耳鼻咽喉科処置

J105 副鼻腔洗浄又は吸引(注入を含む)(片側)

55点

EOG滅菌済

販売元

**DiB** 株式会社 ディヴィンターナショナル

〒112-0002 東京都文京区小石川1丁目4-1 住友不動産後楽園ビル  
TEL(03)5684-5684 FAX(03)5684-5686

製造販売元

**T** 株式会社 塚田メディカル・リサーチ

〒386-2202 長野県上田市真田町本原1931-1  
TEL 0268(72)5370 FAX 0268(72)9755