

2019年2月（初版）
* 2020年2月（第2版）

医療機器届出番号：27B1X00051000006

機械器具 74 医薬品注入器
一般医療機器 輸液用連結管 70399000

連結管 (変換コネクタ)

再使用禁止


【禁忌・禁止】

・再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

〈各部の名称〉*


患者側

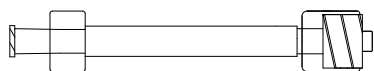

メスルア (IS080369-6)

オスルア (IS0594-1, -2)

充填口側

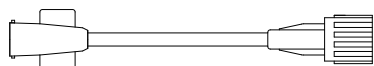

メスルア (IS0594-1, -2)

オスルア (IS080369-6)

・本品はポリ塩化ビニル（可塑剤：フタル酸ジ（2-エチルヘキシル））を使用しております。

【使用目的又は効果】

本品は、チューブの両端に薬液瓶又は他の器具との接続部を持つ連結管である。輸液等に移すために用いる。

【使用方法等】

1. 包装側面の開封口より開封し、汚染に十分注意しながら連結管を取り出します。
2. 接続するコネクタ等としっかり接続してください。

〈使用方法に関連する使用上の注意〉

・薬液をチューブ内に満たして使用する場合は一端を上にして薬液を完全に導いてから使用して下さい。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

・脂溶性の医薬品ではポリ塩化ビニルの可塑剤であるフタル酸ジ（2-エチルヘキシル）が溶出する恐れがあるので、注意すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

・水ぬれに注意し、高温、多湿、直射日光のあたる場所をさけて保管すること。

2. 有効期間

・包装の使用期限を参照のこと。（自己認証(当社データ)により設定）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

〈製造販売業者〉 三矢メディカル株式会社

TEL 06-6707-9105