機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管 管理医療機器 間欠泌尿器用カテーテル (36125000)


DIBマイセルフカテーテル(A)

【禁忌・禁止】

MRI 検査を行う際は本品を検査室へ持ち込まないこと。 [MRI 装置への吸着や、やけど等の恐れがあるため。]


【形状・構造及び原理等】

****<形状>**(代表図)

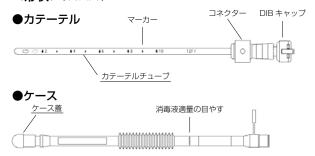

付属品

●DIBキャップ

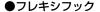





下記の一覧表は弊社規格品の仕様である。特注品については、 個包装に記載された規格を参照すること。

(代表例)

(102(1/1)						
サイズ	外径	全長(男性用)	全長(女性用)			
12Fr	4.0mm	325mm	175mm			
14Fr	4.7mm	32311111				
マーカー:20 ~ 250mm まで 10mm 間隔						
側孔:2孔						

**<原材料>

- · <u>カテーテルチューブ</u>: シリコーンゴム
- ・ケース:ポリエチレン
- ・ケース蓋:着色シリコーンゴム
- ・DIB キャップ:着色ポリプロピレン、鋼板、磁石、

エポキシ樹脂塗料

・フレキシフック被覆材:塩化ビニル

<原理>

カテーテルを膀胱に挿入して導尿する。尿はカテーテルの内腔を通り、DIBキャップのフタを開けて排出する。

【使用目的又は効果】

排尿障害の尿路管理として尿道経由にて膀胱に挿入したうえで、間欠的導尿をする自己導尿用カテーテルとして用いる。 本品は、未消毒につき、消毒した上で使用する。

* *【使用方法等】

- 未使用時の消毒 -

- 1. 医師から処方された消毒液をケースに入れる。
- 2. DIB キャップのフタを開ける。
- 3. ケースにカテーテルを差し込む。
- 4. <u>カテーテルチューブ</u>の内腔に消毒液が上がっているの を確認し、DIB キャップのフタを閉じる。

- 使用前の準備 ——

- フレキシフックを使ってケースを掛けておく。
 ※本書裏面の"■取扱い"の"●ケース"参照。
- 2. 手指を洗浄するか、消毒綿でよく拭く。

- 使用方法 ·

1. (男性用)ペニスを体に対して直角になるように保持し、 亀頭の尿道口から、外側に向かってラセンを描くよう に消毒する。

(女性用) 小陰唇を広げ、尿道口から下向きに消毒する。

- 2. 消毒液が入ったケースから、DIB キャップ付きカテー テルを取り出し、<u>カテーテルチューブ</u>にゼリーを付け る。
- 3. 清潔な利き手で、鉛筆を握るようにカテーテルを持つ。
- 4. (男性用) 反対の手でペニスを固定し、カテーテルを 16~20cm ほど、ゆっくりと挿入する。 (女性用) 反対の手で小陰唇を開き、カテーテルを 4~ 6cm ほど、ゆっくりと挿入する。

※無理に挿入しないこと。

- 5. DIB キャップのフタを開けて排尿する。
- 6. 片方の手で下腹部を圧迫して、尿を出し切る。
- 排尿後、DIB キャップのフタを閉めて、カテーテルを ゆっくり抜く。
- 8. DIB キャップのフタを開けて、水道水でカテーテルの内腔と外側を洗い流す。
- 9. カテーテルを消毒液の入ったケースに入れ、コネクター の奥まで差し込み、DIB キャップのフタを閉じる。

**<使用方法に関連する使用上の注意>

- ・本品を挿入するときに<u>カテーテルチューブ</u>の先端部付近を持たないこと。
- ・膀胱痛、尿道痛、尿の混濁、血液の混ざり等があった場合 は必ず医師に報告し、その指示に従うこと。
- ・カテーテルの挿入・抜去の確認をきちんと行い、無理な挿入・ 抜去は行わないこと。

**【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

- ・本品は、医師の管理下において使用すること。したがって、 使用前に医師の指導を受け、医師の指示にしたがって使用 すること。
- ・本品は未消毒のため、初回は医師の処方による消毒液をケースに入れ、カテーテルチューブ部分を消毒してから使用する。使用後はカテーテルチューブ部分を消毒液の入ったケースに収納し、常時消毒しておくこと。
- ・消毒液及び本品は、医師の指示により交換すること。
- ・使用後は本品を水洗いしてから、消毒液入りケースに戻す こと。
- ・本品を勝手に改造しないこと。また、刃物などによる傷を つけないこと。
- ・使用方法や本品に対して疑問がある場合は、必ず医師に相 談すること。
- ・DIBキャップの開閉部が不潔になった場合、あるいは白い結晶のようなものが付着した場合は、排尿後に消毒綿等で拭くこと。
- ・付属品のDIBキャップのフタを閉めた後に、必ず漏れのないことを確認すること。(本書の"■取扱い"の"●DIBキャップ"参照)。
- ・DIBキャップは磁石を使用しているため、他の医療機器、 時計、磁気カード等、磁気の影響を受けるものには、近づ けないこと。
- ・<u>クロルへキシジングルコン酸塩</u>、ヨウ素及び次亜塩素酸ナトリウム系の消毒液は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

<保管方法>

- ・高温多湿、直射日光、塵埃を避け、清潔な場所で保管する こと。
- ・使用後は消毒液の入ったケースにカテーテルを収納して保 管すること。

* <有効期間>

・製品ラベルに記載されている有効期間欄を参照し、有効期間を経過したものは使用しないこと。

[自己認証(当社データ)による。]

<使用期間>

・本品の使用は30日以内とすること(カテーテルおよびケースが汚染、破損した場合には、医師の指示に基づいて交換すること)。

**【保守・点検に係る事項】

<使用者による保守点検事項>

- ・本品は未消毒につき、消毒液または潤滑剤を添加した消毒液をケースに入れ、この中にカテーテルを収納して常時消毒しておくこと。
- ・消毒液にはベンザルコニウム塩化物、ベンゼトニウム塩化物、カテーテルの挿入時に滑りをよくするための潤滑剤には滅菌グリセリンなどがあるが、いずれも医師の処方による。
- ・消毒液は1日1回交換する。

■取扱い


●ケース

フレシキフックを曲げて、ケースに巻き付けて使用する。フレキシフックをかける場所がない場合にはケース蓋を使用すること。



●D I Bキャップ

漏れないことを確認する。 保管時はポッチにソデをは め込んで固定する。

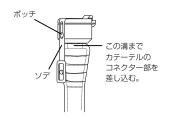

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

<製造販売業者>

株式会社 塚田メディカル・リサーチ

TEL: 0268-72-5370

【販売業者】

株式会社 ディヴインターナショナル

TEL: 03-5684-5684


■使用方法〈男性用〉

Ⅰ 必要な物品を準備する



4 カテーテルの準備をする

DIB キャップの付いたカテーテルを取り出し、 ゼリーを付けます。

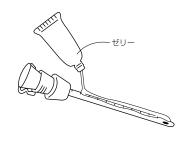

2 手指を消毒する



5 カテーテルを挿入し排尿する

カテーテルを清潔な利き手で鉛筆を握るように持ち、 16~20cmくらい挿入します。 その後、DIB キャップのフタを開けます。



3 尿道口を消毒する

亀頭の尿道口から、外側に向かってラセンを 描くように消毒します。



$oldsymbol{6}$ カテーテルを抜く




■使用方法〈女性用〉

』 必要な物品を準備する



4 カテーテルの準備をする

DIB キャップの付いたカテーテルを取り出し、 ゼリーを付けます。

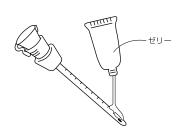

2 手指を消毒する





尿道口の消毒、及び カテーテル挿入時には、 鏡を使用し確認しながら 行うとやりやすいです。

5 カテーテルを挿入し排尿する

カテーテルを清潔な利き手で鉛筆を握るように 持ち、 $4\sim 6$ cm くらい挿入します。 その後、DIB キャップのフタを開けます。



3 尿道口を消毒する

小陰唇を広げ、尿道口から下向きに消毒します。



6 カテーテルを抜く



消毒液

$m{7}$ ケースに戻す

DIB キャップのフタを開けて、 水道水でカテーテルの内腔と 外側を洗い流します。 その後、カテーテルを消毒液 の入ったケースに入れ、コネ クターの奥まで差し込み、DIB キャップのフタを閉じます。