


簡単!ワン・ツー操作

膀胱留置カテーテルに差し込む

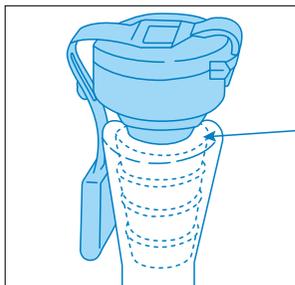

交換は一カ月に1度

この溝までカテーテルのコネクター部分を差し込んでください。



キャップを開けて
排尿する



キャップを閉める



キャップのフタの部分に異物を挟まないよう注意してください。

- 注意事項
- 排尿後、磁気の部分の水気を清浄綿などで拭き取ってください。
 - DIBキャップの内側に尿のカスが溜まってきたら、綿棒等で掃除してください。
 - 長期に使用しますと尿中の結晶物が付着し感染集の原因となります。

MRI禁止

DIBキャップは磁気製品です。MRIなど磁気共鳴装置に入る時は外してください。

DIBキャップは
あなたが生き生きと
活動的な生活を送るための
サポートをします



生活の質の
向上



DIB International Co.,Ltd.

株式会社ディヴインターナショナル

東京都台東区台東4-9-2 〒110-0016
TEL (03)5834-3288 FAX (03)5834-3287
E-mail:dib_cs@dib-international.co.jp HP: <https://www.dib-cs.co.jp>



【楽天】<https://www.rakuten.co.jp/dibshop/>
【twitter】https://twitter.com/dibcap_kun
<https://www.facebook.com/dibInternational>



UD250620A

URO DIB®

快適な生活のお手伝い

ディヴ

DIBキャップ



バルーンカテーテル用
プラグ

簡単
操作

安心の
日本製

清潔

DIB International Co.,Ltd.

排尿障害をお持ちの患者様へ

こんな困りごと ありませんか？

採尿バッグの困りごと

- 行動が制限される。
- 外出が恥ずかしく家にこもりがち。
- お風呂に入りづらい。

尿カテーテル栓の困りごと

- 栓が硬くて抜きにくい。
- 栓を抜く時、床に落としたりなくしてしまう。
- 栓を抜いた時、尿が飛び散ってしまう。
- 尿が漏れてしまう。

※ストッパー、プラグ



その困りごと DIBキャップ※が解決します

※尿道留置カテーテルのプラグ。

採尿バッグは不要です

- 外出、旅行、運動など、活動的になれます。
- 目立たないため、おしゃれが楽しめます。
- お風呂にも入れます。





簡単・清潔に使えて力はいりません

- マグネットにより、軽い力で開閉できます。
- キャップがカテーテルに差し込まれているため落ちることはありません。
- 尿が飛び散らない形状で手が汚れません。
- マグネットにより密閉され、尿が漏れることはありません。



あなたは膀胱を 使っていますか!?

採尿バッグを使うと、
尿はバッグにたまります。

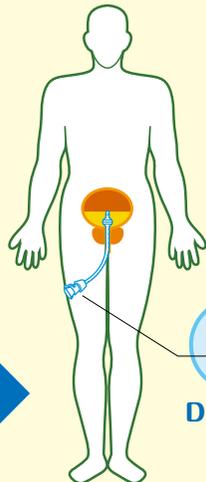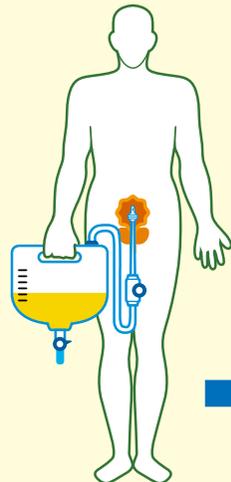

採尿バッグからの 解放!!

DIBキャップを使用した
クローズドシステムにより、
尿は膀胱にたまります。

よくある質問

Q1 どのような患者さんに使用できますか？

A 認知症がなく、ご自身でカテーテル管理ができる方、尿意がある程度保たれている患者さんに最適です。また、外瘻用カテーテルのプラグとしてもお使い頂けます。

Q2 どの膀胱留置カテーテルに使用できますか？

A どのメーカーのシリコン製膀胱留置カテーテルにも広く使用いただけます。

Q3 使用期間を教えてください。

A 一か月以内、またはカテーテル交換時に新しいDIBキャップと交換してください。

シリコンアタッチメントのご案内

夜間など、採尿バッグを使う際にDIBキャップとバッグをつなぐアタッチメントです。



- 他メーカーの採尿袋とも接続可能です。
- 使用開始から一か月以内を交換の目安としてください。



接続方法

- キャップを開ける
- ↓
- アタッチメントを差し込む
- ↓
- 尿バッグとつなぐ